



Flaconi lavaocchi



· Lavaocchi tascabile



· Doccia di emergenza



· Lavaocchi da parete



· Lavaocchi da trasporto

Complementi degli occhi

Descrizione e composizione:

Soluzione salina sterile allo 0,9%, da utilizzare quando un prodotto o una sostanza entra negli occhi.

Contiene polipropilene, materiale inerte che permette la conservazione ottimale della soluzione salina.

900438 - Flacone lavaocchi riempibile: Doccia di emergenza. Da utilizzare come doccia di emergenza per gli occhi. Valvola di drenaggio. Chiusura ermetica.

900303 - Flacone lavaocchi tascabile: Contiene 200 ml di soluzione salina sterile allo 0,9%.

914437 - Flacone lavaocchi da parete: Con supporto a parete. Composto da supporto a parete e 2 bottiglie da 1 litro di soluzione salina sterile allo 0,9%.

911797 - Flacone lavaocchi da trasporto: Composto da supporto speciale per il TRASPORTO e 2 bottiglie da 1 litro di soluzione salina sterile allo 0,9%.

EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001

ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021

Rif.	Prodotto	Capacità
900438	Flacone lavaocchi riempibile: Doccia di emergenza	775 cm ³
900303	Flacone lavaocchi tascabile:	200 ml
914437	Flacone lavaocchi da parete:	2 bottiglie da 1 litro
911797	Flacone lavaocchi da trasporto:	2 bottiglie da 1 litro
900355	Ricarica flacone lavaocchi:	2 bottiglie da 1 litro

Complementi degli occhi

Norma e certificazione	EN 15154-4:2009 EN 556-1:2001 ISO 17665-1:2006 ISO 14644-1:2015 ISO 17141:2020 ISO 15223-1:2021
Applicazioni	Soluzione salina sterile allo 0,9%, da utilizzare quando un prodotto o una sostanza entra negli occhi.
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Si consiglia di conservare le bottiglie negli speciali supporti appositamente progettati a questo scopo. La temperatura ottimale di conservazione è 2 - 35 °C. Data di scadenza: leggere la confezione.
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Applicare il prodotto direttamente sugli occhi. Essendo sterile, non causerà alcun danno. Il prodotto presenta una facile apertura. Permette di controllare efficacemente il flusso di soluzione desiderato. Una volta aperta la bottiglia, il contenuto deve essere usato entro poche ore dall'apertura. Altrimenti, gettare il contenuto.
Presentazione	Flacone lavaocchi riempibile: Doccia di emergenza: Confezione individuale: 1 unità. Cartone da 6 unità Flacone lavaocchi tascabile: Confezione individuale: 1 unità. Cartone da 12 unità Flacone lavaocchi da parete: Confezione individuale: 1 unità. Cartone da 12 unità Flacone lavaocchi da trasporto: Confezione individuale: 1 unità. Cartone da 12 unità Ricarica flacone lavaocchi: Confezione individuale: 1 unità. Cartone da 12 unità

